



Zeitgeist 2

Svestran među džepnim satovima

HR

Zeitgeist 2 je pravi užitak: govorni sat sa svim vrstama dodatnih najsuvremenijih funkcija. Zeitgeist 2 može se nositi na vrpici oko vrata ili nositi u džepu predviđenim za džepni sat.

Akustična komunikacija koristi oblik zvučnog izlaza temeljenog na prirodnom ljudskom glasu i kratkim zvučnim signalima.

Iako je dizajniran za osobe oštećenog vida, Zeitgeist 2 također može biti koristan za osobe zdravog vida svake životne dobi.

Sadržaj pakiranja

- Zeitgeist 2 osnovni uređaj (7x4x1 cm, 29 grama)
- Vrpca za vrat
- USB strujni ispravljač
- USB kabel za punjenje (USB-A na USB-C)
- Korisnički priručnik (ispisan i na USB memoriji) Zeitgeist 2 basic device (7x4x1 cm, 29 grams)

Održavanje uređaja

Zeitgeist 2 je dizajniran s namjerom da traje dugo, ali se od korisnika očekuje odgovorno rukovanje i održavanje da se to postigne. Uređaj nije vodootporan, pa ga držite podalje od tekućina i vlage. Također, uvjerite se da u njegovim otvorima nema stranih tvari.

Napajanje

Ugrađena punjiva litij-polimerna baterija, kapaciteta 3.7 V i 400 mAh, sa zaštitnim krugom. Kabel s konektorima USB-C je uključen u pakiranje za njezino punjenje. Konektori se mogu umetnuti u oba smjera, tj. oni nemaju "gore" ili "dolje" položaj. (Nema razmjene podataka putem USB veze.) Napunjenost traje nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o intenzitetu korištenja i učestalosti (trošenja) baterije.




Načelo rada

Uređaj je u osnovi dizajniran da tijekom uporabe bude potpuno ozvučen; omogućena grafika, reflektirajući LCD zaslon samo pružaju dodatne informacije videćim ljudima. Svaki pritisak na tipku, označen je haptičkim povratnim informacijama u obliku kratke vibracije.

Početni zaslon, ako neko vrijeme nije pritisnuta tipka, prikazat će osnovni prikaz s najvažnijim informacijama uređaja kao što su točno vrijeme, datum i u gornjem desnom kutu, status punjenja baterije. U gornjem lijevom kutu prikazuju se različite ikone ovisno o radnom stanju; pogledajte popis na slici. Za detaljan opis, pogledajte opširan korisnički priručnik, poglavlje 2.3.

Ukoliko se nalazite u podizborniku uređaja, zvučni izlaz bit će dopunjen pojedinačnim ulaznim/izlaznim statusom prikazanim na zaslonu.

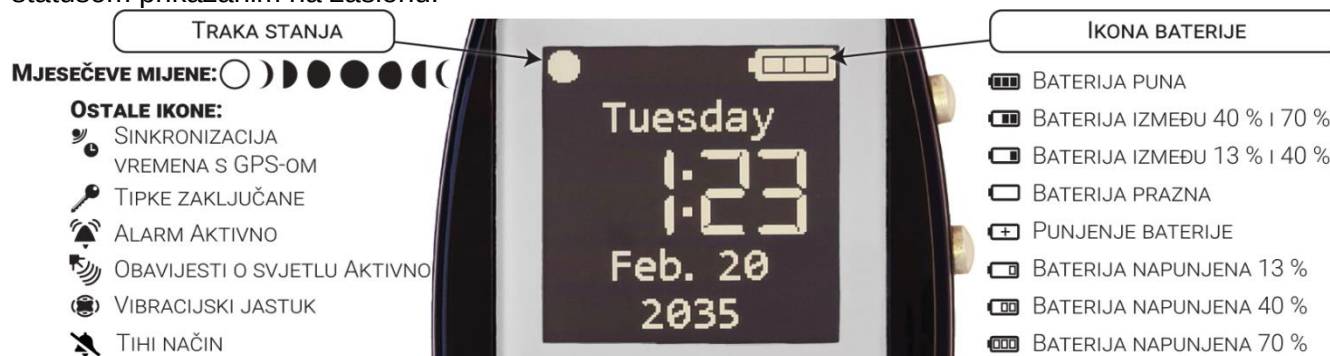

Zeitgeist 2 koristi kružne izbornike poznate još i kao beskonačni izbornici i bročane postavke. Dakle, kada se pomičete gore i dolje, krećete se u krug, npr. prilikom odabira mjeseca, iza prosinca dolazi siječanj.

U slučaju triju tipki, uređaj razlikuje koliko su dugo pritisnute: **KRATKO** i **DUGO** (dugo oko jedne sekunde). Funkcije tipki su slične za mnoge stavke izbornika:

- Upotrijebite **KRATKI** pritisak na tipku **gore** ili tipku **dolje** (**Gore KRATKO** ili **Dolje KRATKO**) za pomicanje prema gore ili prema dolje ili za prebacivanje između stanja, npr. između aktivnog ili neaktivnog.
- Upotrijebite **DUGI** pritisak na **srednju** tipku (**Srednja DUGO**) za pokretanje stavke izbornika.
- Upotrijebite **KRATKI** pritisak na **srednju** tipku (**Srednja KRATKO**) za informacije o odabranoj stavci izbornika. U svakoj stavci pomaknite se naprijed za jedan korak u nizu dostupnih opcija.

Na primjer, prilikom postavljanja vremena u kalendaru:

Dok se krećete naprijed po jedan korak između godina/mjesec/dan itd., pritiskom na **Srednja KRATKO**, istovremeno potvrđujete prethodnu stavku. Pojedinačna numerička vrijednost, npr. broj za određeni dan odabire se ponovnim **KRATKIM** pritiskom na tipku **gore** ili tipku **dolje**.

Što se tiče **tipkovnih kombinacija** kada se istovremeno pritisnu dvije tipke, uređaj također pravi razliku između **KRATKOG** i **DUGOG** pritiska. Najvažnija kombinacija koja vrijedi gdje god da je aktivirana: **Gore i Dolje KRATKO** = **Odustajanje** od funkcije; ona vas vraća na početni zaslon.

		GORE	SREDINA	DOLJE
POČETNI ZASLON	KRATKI PRITISAK	VRIJEME	INFORMACIJE OD NEDAVNE STAVKE IZBORNIKA	- DATUM - KALENDARSKI TJEDAN - MJESEČEVE MIJENE - DANI DO MLAĐAKA
		ALARM INFORMACIJE		
		KALENDAR DOGAĐAJA INFORMACIJE		
		BATERIJE INFORMACIJE		
		ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE UREĐAJA: (GORE + SREDINA + DOLJE) + GORE		
	DUGI PRITISAK	VRIJEME VIBRIRANJA	UNESI IZBORNIK	START LUMITEST
		UKLJUČI/ISKLJUČI GPS		
		NOVA BILJEŠKA BILJEŽNICE		
		DRŽI 12,5 SEKUNDI ZA RESETIRANJE UREĐAJA		

Općenitim funkcijama možete također pristupiti izravno s početnog zaslona:

- Dodirni vremenski izlaz za vibracije (pojednosti o sustavu kodiranja vibracija pogledajte u poglavlju 5.1.1)
- Zvučna najava datuma i točnog vremena u dugačkom obliku
- Tipka za zaključavanje (ključanica) i RESETIRANJE

Pregled funkcija glavnog izbornika i gdje ih možete pronaći u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU

- Štoperica..... Poglavlje 6.1
- Brojač vremena Poglavlje 6.2
- Alarm Poglavlje 6.3 / 6.3.1
- Kalendar..... Poglavlje 6.3 / 6.3.2
- Bilježnica (glasovni zapisi)..... Poglavlje 6.4
- Lumitest / obavijest o svjetlu..... Poglavlje 6.5 / 6.5.1
- Kompas..... Poglavlje 6.6
- Pedometar Poglavlje 6.7
- Igre (podizbornik) [Igra sat, kocke, 8 lopti] Poglavlje 6.8 s 3 podstavke
- Menstrualni calendar Poglavlje 6.9
- Postavke (podizbornik)..... Poglavlje 7 s 10 podstavki

Glavni izbornik pokreće se sa **Srednja DUGO** na početnom zaslonu.


Gornja KRATKO / Donja KRATKO koriste se za pomicanje kroz pojedinačne unose.

Ako nijedna tipka nije pritisnuta unutar 10 sekundi, uređaj se vraća na početni zaslon praćen kratkim zvučnim signalom.

Ukoliko se pritisne **Srednja KRATKO**, započet će dohvaćanje informacija za pojedinačnu stavku izbornika. Vi ćete, na primjer, čuti koliko imate spremljenih kalendarских unosa ili glasovnih zapisa. Neke od tih informacija mogu se dohvatiti izravno s početnog zaslona s određenim tipkovnim kombinacijama (brzi pristup).

Srednja DUGO pokreće odabranu funkciju u glavnom izborniku.

Neke funkcije nastavljaju raditi u pozadini dok se ponovno prikazuje početni zaslon.

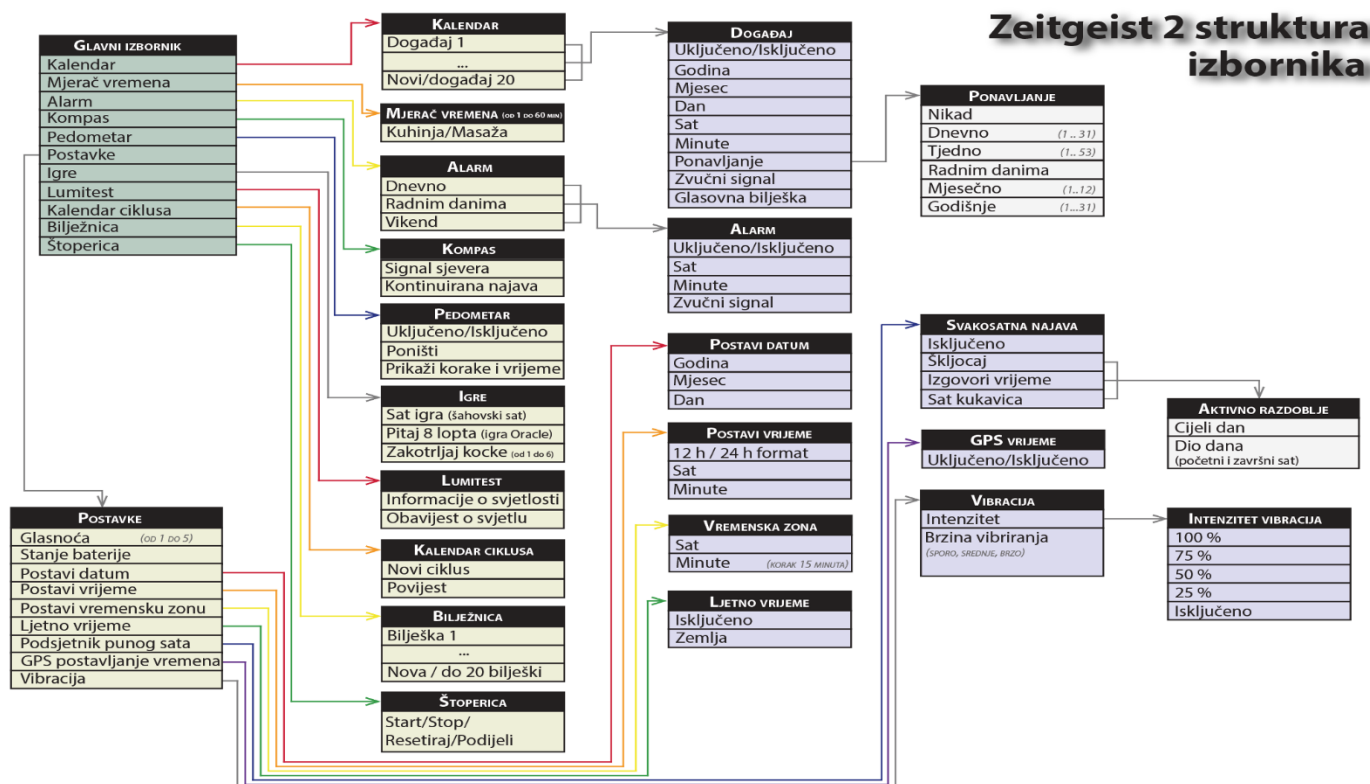

Općenito, za sve funkcije, začut će se odgovarajuća zvučna poruka čim se pritisne tipka. Kod nekih funkcija, npr. sat za šah (igra sat), potrebno je odabrati mogućnosti prije početka pokretanja funkcije, dok su druge funkcije, kao što je štoperica, odmah spremne za uporabu.

Postavke sustava (podizbornik postavke) i gdje ih možete pronaći u KORISNIČKOM PRI- RUČNIKU

Za pozivanje pojedinačnih postavki sustava, u glavnom izborniku odaberite podizbornik postavke i pomi-
čite se po dostupnim mogućnostima s **Gornja i Donja KRATKO**. Tada možete pokrenuti potrebnu funk-
ciju koristeći **Srednja DUGO**. Kao i u glavnom izborniku, **Srednja KRATKO** koristi se za izlaz trenutne
postavke pojedinog unosa. Ovdje se primjenjuju jednake radnje, tj. upotrijebite **Gornja ili Donja KRAT-**
KO za uređivanje brojčanih vrijednosti, zatim odaberite mogućnost, a potom **Srednja KRATKO** da biste
potvrdili ili nastavili naprijed na sljedeću mogućnost.

Ako želite odustati dok ste u postavkama, možete se vratiti na početni zaslon koristeći uobičajnu tipkov-
nu kombinaciju **Gornja+Donja KRATKO**, bez spremanja unešenih promjena.

- Glasnoća - Pet razina glasnoće..... Poglavlje 7.1
- Punjiva baterija - Stanje punjenja u postotcima..... Poglavlje 7.2
- Datum i vrijeme - Ručni odabir Poglavlje 7.3
- Vremenska zona - Vremenska razlika od srednjeg vremena po Greenwichu Poglavlje 7.4
- Ljetno računanje vremena - Automatsko prebacivanje između standardnog
i ljetnog računanja vremena, Poglavlje 7.5
- Tvornički reset - Očitavanje verzije instaliranog softvera Poglavlje 7.6
- Svakosatni signal - Svakosatni podsjetnik (bip, kukavica) Poglavlje 7.7
- GPS vrijeme - Automatsko postavljanje vremena putem satelita..... Poglavlje 7.8
- Bluetooth - Opcionalno "jastuk" vibracijska kutija (bed shaker)
za pojačanje signala alarma..... Poglavlje 7.9.1
- Vibracija - Postavke za vrijeme sata pomoću vibracijskog koda i dodirne
povratne informacije..... Poglavlje 7.10

Dodatne informacije

- Tehnički podaci Poglavlje 8
- Sigurnosne upute i odlaganje Poglavlje 9 i 9.1
- Jamstvo, servisiranje i proizvođač Poglavlje 10 i 10.1

	Ovaj uređaj proizveo je: CareTec International GmbH Stubenbastei 1 A-1010 Vienna Austria Telefon: (+43 1) 513 80 81 - 0 Telefaks: (+43 1) 513 80 81 - 9 E-pošta: office@caretec.at Internet: www.caretec.at	
---	--	---

Tvrtka Caretec razvija i proizvodi govorna i taktalna pomagala za visoko slabovidne, slijepe, gluho-slijepe i osobe slijepe na boje od 1988. godine. Distributeri u brojnim zemljama prodavaju Caretec proizvode, koji uključuju jednos-
tavna pomagala kao što su okviri za potpis, testeri baterije, prsteni za čarape, izrađivač brajčnih naljepnica, nov-
čarke za kovanice i šablone za identificiranje novčanica i kovanica, s više od milijun korisnika u mnogim zemljama,
kao i sofisticirane taktilne i/ili govorne proizvode kao što su pomagalo za ručno izradu taktilnih crteža i geometrijski
pribor za crtanje na specijalnim folijama, detektor boja i svjetla, kuhinske i osobne vage, financijski i znanstveni
kalkulatori, čitač naljepnica, ultrazvučni detektori prepreka, punjač baterija, mjerni instrument (metar, kutomjer i
libela), satovi i dugi bijeli štapovi.

Nagrade: "Louis Braille Prize" (Nagrada Louis Braille) od Njemačkog saveza slijepih i "Winston Gordon Award of
Excellence" (Winston Gordon nagrada za izvrsnost) od CNIB / Kanadskog nacionalnog instituta za slijepe; Prva
nagrada i pet počasnih priznanja u "Mercur", nagrada za inovacije od Bečke gospodarske komore.